



Nieuwsbrief POCT KCHL Gelre ziekenhuizen

Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium
Redactieadres: POCT@gelre.nl
Contactpersoon: POCT Gelre

Aan: Point Of Care gebruikers

No. 2, Oktober 2011

Inleiding

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het POCT (point-of-care testing) team van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium van de Gelre ziekenhuizen. Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen en houden van de nieuwste ontwikkelingen vanuit het POCT team en de 'hot topics' binnen ons vakgebied.

Mededelingen

Trainingen glucosemeter

Via de kalender op intranet kunt u zien wanneer er nieuwe trainingsdata voor de glucosemeter zijn. Heeft u een passende datum gevonden stuur dan een e-mail met de datum, uw naam, afdeling en personeelsnummer naar: POCT@gelre.nl.

Inlog problemen op de glucosemeter

Er zijn veel gebruikers van de glucosemeter die hun code niet meer kunnen gebruiken. Om gebruik te kunnen blijven maken van de code is het noodzakelijk dat je tijdig de gewenste e-learning volgt. Indien dit niet op tijd gebeurt dan verloopt het gebruik van de code! Indien de code niet meer werkt mail je gebruikersnaam/personeelsnummer naar POCT@gelre.nl. We geven je dan een certificaat voor 2 maanden. In deze periode kan je de e-learning volgen (zie punt info e-learning), waarna je weer voor ruim een jaar bent geregistreerd.

Info e-learning

In november starten we op beide locaties met het verplichte e-learning programma. Via intranet en de website van het KCHL is

hierover meer informatie te vinden. Vanaf heden is de toets ook terug te vinden via een link op het leerplein,

www.gelre-leerplein.nl. Indien de glucose cursus voor jou niet beschikbaar is neem dan contact op via POCT@gelre.nl.

Helaas is het alleen mogelijk om de toets via intranet te maken, dus alleen vanuit het ziekenhuis.

Indien er geen e-learning is gevolgd, is gebruik van de code niet mogelijk en kan er niet worden gewerkt met de glucosemeters. (Zie punt inlogproblemen op de glucosemeter.)

Doorgeven glucose uitslagen

In de glucosemeters zit een mogelijkheid om een onbetrouwbaar gemeten uitslag of een glucosemeting die wordt herhaald niet in het EPD weer te laten geven. Dit kan door na de meting het tekstballonnetje linksonder in het resultaatscherm te selecteren. Je kan 3 mogelijkheden met de uitslag meegeven:

1. patiëntverwisseling
2. foute meting
3. test wordt herhaald

Door de glucosemeting te herhalen kan een juiste uitslag worden verkregen welke normaal in het EPD zal worden gerapporteerd. Een onbetrouwbare uitslag die reeds gerapporteerd is in het EPD moet middels mutatieformulieren verwijderd worden. Deze formulieren zijn op het lab te krijgen.

>>>

Gebruikersvoorschrift inzien in DKS

Via intranet is het protocol voor de glucosebepaling terug te vinden (DKS, zoek op "glucose").

Gedragcode inlog gebruik

In de gedragscode van het ziekenhuis (6.5.2) staat beschreven dat medewerkers geen gebruik mogen maken van systeemidentificatie en/of password dat niet aan de medewerker is toegewezen en het eigen password niet zonder geautoriseerde machtiging aan anderen ter beschikking mag stellen. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen inlogcode en deze niet mag uitlenen. Uiteindelijk ben jijzelf verantwoordelijk voor het geen herleidbaar is naar jouw inlogcode.

Wist u (nog) dat:

- je zelf schone en droge handen moet hebben om de glucose strip niet te vervuilen.
Gebruik anders handschoenen
- je in een warme vinger/hiel moet prikken, om stuwen te vermijden
- de patiënt bij voorkeur in de middel- of ringvinger aan de zijkant moet prikken



- je de vinger/hiel schoon maakt met water
- je de 2^e druppel gebruikt voor analyse
- er altijd leenmeters op het lab aanwezig zijn. Deze zijn te gebruiken bij patiënten in isolatie of bij problemen met je afdelingsmeter.
- je een vervuilde meter schoon maakt met een doekje met een milde (hand)zeepoplossing. Let op: niet met alcohol, i.v.m het touchscreen
- op iedere afdeling gele noodformulieren in de glucoseklapper liggen, deze zijn te gebruiken bij cito

glucoses bij patiënten zonder patiëntnummer (bijv. bezoek)

- i-stat gebruikers: je bij gebruik van de heparine spuit deze heel goed moet mengen voor je de cartridge gaat vullen.

En aansluitend geldt voor alle POCT meters dat het laboratorium de back-up is!
We wensen iedereen veel meetplezier!

POCT Gelre:

Simone Smeur, Sandra ten Hoopen, Dianne Timmerman en Susan Meijerink

e-mail: poct@gelre.nl

